

ノンクラスプデンチャーに光沢感

スピーディーに素材本来の色調を活かせるっ！

Selebright Resin Professional

セブレライトレジンフロ

ノンクラスプ全般（アクリルレジン系、ポリエステル系、ポリアミド系など）、硬質レジンにも最適なルージュ。

素早く光らせ艶を得ることができるので柔らかな素材への研磨作業がはかどります。

ポリエステル系、ポリアミド系などの軟質素材のノンクラスプデンチャーを全体的に輝きを持たせた研磨を素早くおこなうことができます。

特有の「ねばり」がある素材に対して効果的です。

<使用方法>

各ブラシ・バフにセブレライトレジンフロをまわして研磨します。



販売名	セブレライトレジンフロ
容 量	80g / 200g
包 装	1 個入
標準価格	80g: 2,100 円 200g: 4,200 円

届出番号 27B3X0013900090 一般医療機器（クラスⅠ）歯科用研磨器材

Selebright Resin Professional PASTE

セブレライトレジンフロペースト

ノンクラスプデンチャーをしっかりと艶出し研磨することができる研磨材を

ペースト状にすることによりピンポイントでの研磨に最適です。

チェアサイドでも手軽に効率良く艶出しをおこなえます。

適度なペースト感は研磨材の飛散を抑えしっかりとピンポイントでの艶出しがおこなえます。

<使用方法>

研磨したい面にペーストを指などで適量を塗り付けて、局所的に各種ブラシ・バフで研磨します。



販売名	セブレライトレジンフロペースト
容 量	50g
包 装	1 個入
標準価格	2,400 円

届出番号 27B3X001390091 一般医療機器（クラスⅠ）歯科用研磨器材

ポリアミド系 / ナイロン系 / ポリプロピレン系樹脂等

	傷取り	粗研磨	中研磨	仕上げ	艶出し
キズトリ Pad	7,000 ~ 10,000				
ラジアルディスク	コース/ミディアム/ファイン/EXファイン				
レザーサンドスラシ	ハード	ソフト			
ファイバーボール MOJA					
コットンボール MOCO			10,000 ~ 12,000		
セレックバフ			マルチ		ホワイト 15,000
研磨ペースト				レジスロ/レジスロペースト	

※レザーサンドスラシ S/H、ラジアルスラシは歯頸部等の細かい所へ有効

ポリエステル系樹脂等

	傷取り	粗研磨	中研磨	仕上げ	艶出し
キズトリ Pad	8,000 ~ 10,000				
ラジアルディスク	コース/ミディアム/ファイン/EXファイン				
レザーサンドスラシ	ハード	ソフト			
ファイバーボール MOJA			10,000 ~ 12,000		
コットンボール MOCO					
セレックバフ			マルチ 10,000 ~ 12,000		ホワイト 15,000 ~ 18,000
研磨ペースト				レジスロ/レジスロペースト	

アクリル系樹脂等

	傷取り	粗研磨	中研磨	仕上げ	艶出し
キズトリ Pad	8,000 ~ 10,000				
ファイバーボール MOJA		10,000 ~ 12,000			
コットンボール MOCO			10,000		
セレックバフ			グリーン 10,000 ~ 12,000		ホワイト 15,000 ~ 18,000
研磨ペースト				レジスロ/レジスロペースト	

<使用方法>

カーバイドバー／カーボランダムポイント等で削合調整を行い、それぞれ用途に合わせて研磨します。

標記している数字は推奨回転数。

販売

セレック株式会社

セレックキズトリ Pad

アクリル系・ポリエステル系・ポリアミド系等のすべてのレジンに対して
バリ取り後の傷取りにておいて深めの傷でも素早く均すことができます。



販売名	セレック キズトリ Pad
直 径	直径 24mm× 高さ 4mm
包 装	10 個入 (マンドレル付) / 3個入
標準価格	10 個入 : 4,800 円 3 個入 : 1,800 円

届出番号 27B3X00077BK0004 一般医療機器 (クラスⅠ) 歯科用研磨器材

Selec Lether-Sandwich Brush HARD / SOFT

セレックレザーサンドブラシ ハード / ソフト

面部分の研磨に最適な革素材を軟性ブラシ素材で挟み込むことで、
ノンクラスプデンチャーの歯間乳頭などの細かな隙間の傷取りを
スピーディーにおこなえます。



販売名	セレックレザーサンドブラシ ハード セレックレザーサンドブラシ ソフト
直 径	22mm
包 装	12 本入
標準価格	12 本入 : 3,300 円

推奨使用回転数 20000 rpm 届出番号 27B3X00077WJ0002 一般医療機器 (クラスⅠ) 歯科用研磨器材

Selec Fiber ball MOJA

セレックファイバーボール MOJA

アクリル、ポリエステルなどの熱可塑性レジンの研磨、傷取りに弾力のある
繊維質ボールが効果的です。手間のかかる広範囲の研磨作業を早く
おこなうことができます！



販売名	セレックファイバーボール MOJA
直 径	24mm
包 装	12 本入
標準価格	3,800 円

推奨使用回転数 10000 rpm 届出番号 27B3X00077WJ0001 一般医療機器 (クラスⅠ) 歯科用研磨器材

Selec Mandrel H70 / H50

セレックマンドレル H70 / H50

各種研磨／研削材料を均等にしっかりと固定する HP 用マンドレル。
ディスクやホイールのサイズに合わせてヘッドサイズが 2 種類があります。



ヘッド部直径
H70 : φ 7.0mm
H50 : φ 5.0mm


販売名	セレックマンドレル H70 / H50
包 装	5 本入 / 10 枚入
標準価格	5 本入 1,200 円 / 10 本入 2,300 円

届出番号 27B3X00077BK0005 一般医療機器 (クラスⅠ) 歯科用マンドレル

●標準価格は 2020 年 5 月 21 日現在の価格です。消費税は含まれておりません。●セブレライトレジンプロ及びレジンプロペーストの製造販売元は有限会社アイデンタル工業様です。

セレックラジアルディスク

歯頸部のバリ取りなど狭い箇所へかき出すことで細かい傷取りに最適です。
数枚かさねて広い面の研磨にも使用できます。

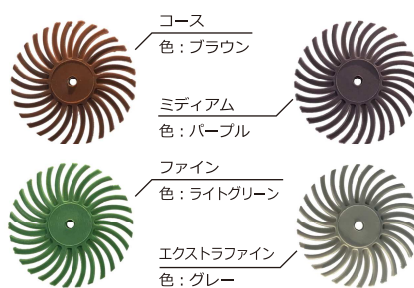

複数枚かさねて
上下方向に
研磨するのが効果的

販売名	セレックラジアルディスク コース / ミディアム / ファイン / エクストラファイン
サイズ	25mm
包 装	60 枚入 / 12 枚入
標準価格	60 枚入 : 9,800 円 12 枚入 : 2,200 円

最高使用回転数は 10,000r.p.m. 届出番号 27B3X00077WJ0003 一般医療機器 (クラスⅠ) 歯科用研磨器材

Selebright Buff - Green -Multi -White

セブレライトバフ グリーン / マルチ ホワイト / ホワイト No.1

適度にコシのあるバフは研磨力に優れ、ルーージュの保持力も良く、
それぞれの素材に対し効率的な研磨をおこなえる。



※ルーージュを付けずにご使用下さい。

販売名	セブレライトバフ グリーン セブレライトバフ マルチ セブレライトバフ ホワイト セブレライトバフ ホワイト No.1
サイズ	25mm
包 装	12 枚入 / 3 枚入
標準価格	12 枚入 : 4,800 円 3 枚入 : 1,500 円

届出番号 27B3X00077SE0001 一般医療機器 (クラスⅠ) 歯科用研磨器材

Selec Cotton ball MOCO

セレックコットンボール MOCO

良質なコットンを丸形に成型することで、しっかりと押し当てての
研磨が可能です。適度に柔らかなコットンはルーージュの付着持ちが
良いので、口蓋部等の幅広い面や粘膜面の艶出しに最適です。



販売名	セレックコットンボール MOCO
直 径	24mm
包 装	10 本入
標準価格	2,500 円

推奨使用回転数 10000 rpm 届出番号 27B3X00077SM0005 一般医療機器 (クラスⅠ) 歯科用研磨器材

